


# Protecteur cutané convexe

## Éducation du patient

Coloplast®  
Professional

Cet appareillage est muni d'un protecteur cutané courbé vers l'extérieur. La surface arrondie vers l'extérieur s'appuie contre la peau pour procurer une meilleure étanchéité du joint entre le protecteur cutané et la peau, de sorte à empêcher la fuite des déjections et de l'urine sur la peau. La convexité crée une légère tension sur la peau autour de la stomie et fournit un joint étanche. Cette convexité peut être utile pour la stomie située au niveau ou sous la surface de la peau, car elle assure une saillie plus prononcée de la stomie, permettant ainsi le flux des déjections directement dans le sac. Il existe différents degrés de convexité afin de répondre aux divers besoins.

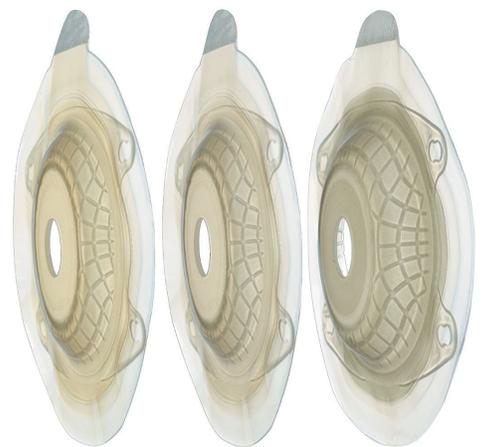

Il est possible que votre stomathérapeute vous ait suggéré de porter un protecteur cutané convexe pour les raisons suivantes :

- votre stomie est égale avec la surface de votre peau, rétractée sous la surface de la peau ou enchâssée dans une zone creuse;
- la peau autour de votre stomie n'est pas plate;
- votre abdomen est très mou autour de la stomie.

## Suggestions de fournitures

- Guide de mesure
- Protecteur cutané Coloplast® N° de commande : \_\_\_\_\_
- Sac Coloplast® N° de commande : \_\_\_\_\_
- Anneau moulable Brava® ou joint d'étanchéité Brava® N° de commande : \_\_\_\_\_
- Ceinture Brava® N° de commande : \_\_\_\_\_
- Bandes de barrière élastiques Brava® N° de commande : \_\_\_\_\_
- Papier hygiénique
- Linge doux ou essuie-main doux
- Eau tiède
- Sac en plastique



## Remplacer le sac


Préparez votre peau, comme vous le feriez normalement. Il est possible que votre stomathérapeute vous recommande d'ajouter l'un des produits suivants à votre protecteur cutané convexe :

### Anneau moulable Brava® ou joint d'étanchéité Brava®

- Placez l'anneau moulable ou le joint autour de votre stomie ou directement au dos du protecteur cutané pour le faire correspondre à la taille de l'ouverture de la stomie, puis appliquez.

### Bandes de barrière élastiques Brava®

- La bande de barrière doit couvrir une partie de l'adhésif.
- Utilisez une bande de barrière élastique pour encadrer le protecteur cutané.
- Positionnez le protecteur cutané convexe sur votre abdomen.

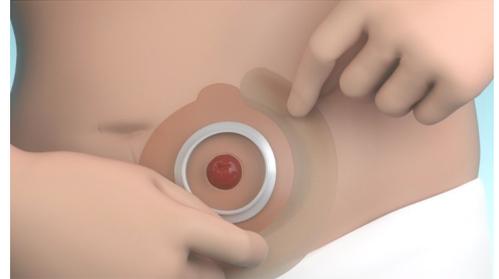

Application des bandes de barrière élastiques Brava®

## Renseignements additionnels

ISPSC : \_\_\_\_\_

Médecin : \_\_\_\_\_

Fournisseur de produits pour stomie : \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

## Directives particulières

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---