

Conveen® Optima

Les mesures sont
des approximations
proches



Pour déterminer la circonférence: Mesurez à la partie la plus large du pénis lorsque le pénis est détendu. Placez le pénis dans les arcs de cercle pour déterminer la meilleure taille.

ISi le pénis se situe entre deux tailles, choisissez la taille la plus petite.

Mesurez la longueur du pénis en plaçant l'extrémité du guide bande bleu (sport ou standard) le long du pénis en commençant par la base (point le plus proche du corps) et mesurez jusqu'au bout du pénis.

Coloplast

Coloplast Canada Corporation, Oakville, ON.
www.coloplast.ca Le logo Coloplast est une
marque déposée de Coloplast A/S
©2021-03 Tous droits réservés Coloplast A/S

base

Court

bout

bout

Régulier

base