

Pensou cateter hidrofílico, Pensou **SpeediCath®** ♂



Benefícios de SpeediCath®



1

Reduz o risco de infecções urinárias e trauma uretral



2

Reduz custo de tratamento e resistência a antibióticos



3

Melhora a qualidade de vida

Revestimento Hidrofílico Único: seu revestimento excepcionalmente suave e uniforme garante inserção e retirada com o mínimo de atrito superficial, reduzindo o risco de complicações no trato urinário.



Revestimento hidrofílico de SpeediCath®



Revestimento hidrofílico tradicional

Orifícios polidos e lubrificados: garantem uma transição suave entre a superfície do cateter e a mucosa uretral, minimizando o risco de trauma uretral.



Orifícios polidos de SpeediCath®



Orifícios sem polimento

Passo a passo

Cateterismo Intermitente


Certifique-se de que todo o material necessário esteja pronto antes de iniciar o cateterismo.

1 - Comece sempre lavando bem as mãos com água e sabão.



2 - Agora você pode preparar o cateter hidrofílico:

- Remova a cobertura da parte adesiva da embalagem;
- Cole a parte adesiva em uma superfície limpa e lisa;
- Assegure-se de que a embalagem esteja posicionada verticalmente;
- Abra a embalagem puxando o anel em sua direção e depois para baixo;
- Para evitar vazamentos, só abra até o ponto em que aparecer o conector inteiro;
- Se você não for drenar a urina diretamente para o vaso sanitário ou outro recipiente, conecte a bolsa de urina ao cateter e coloque a bolsa em uma posição segura.

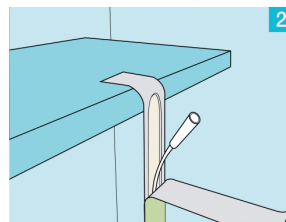

Caso aconteça a retomada do controle miccional, tente sempre urinar naturalmente antes de iniciar o cateterismo.

Digitalize os códigos ao lado em seu smartphone ou iPad e assista ao vídeo de demonstração dos produtos compactos. Para maiores informações, entre em contato com a Central de Atendimento Coloplast através do 0800 285 8687 ou envie e-mail para ativa@coloplast.com

Técnica para os homens

- 1 Abaixe a roupa para facilitar o acesso à genitália.


Com cuidado, puxe o prepúcio para trás segurando o pênis com a mão não dominante e limpe a glândula com água e sabão.




- 2 Segure o pênis apontando-o ligeiramente para cima. Isto irá facilitar a inserção do cateter. Faça uma leve pressão na ponta do pênis de forma a abrir a entrada da uretra.

Retire o cateter da embalagem com a sua mão não dominante segurando-o pelos primeiros 5 cm sem lubrificação.

Não permita que o cateter toque em nada antes de introduzi-lo na uretra.

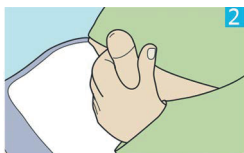

- 3 Insira lentamente o cateter na uretra conforme lhe foi ensinado.

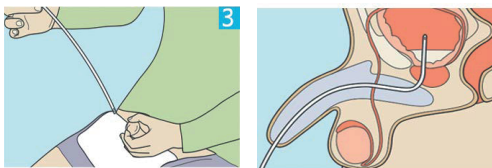

4. Quando a urina aparecer, insira o cateter por mais dois centímetros e pare, neste momento a urina irá fluir e você aguardará o esvaziamento total da bexiga. Quando não houver mais fluxo de urina, remova o cateter girando-o lentamente e pare a cada vez que sair urina. Assim que terminar o cateterismo, devolva o cateter para a embalagem e descarte em seu lixo doméstico.

Não reutilize o cateter.

Para finalizar, repita a lavagem das mãos com água e sabão.



Técnica para as mulheres

- 1 Abaixe a roupa para facilitar o acesso à genitália.
- 2 Realize a limpeza da região genital com água e sabão

Esta etapa é muito importante para reduzir o risco de infecção urinária, o orifício da uretra deve estar limpo antes da introdução do cateter.

Retire o cateter da embalagem com a sua mão não dominante segurando-o pelos primeiros 5 cm sem lubrificação

Não permita que o cateter toque em nada antes de introduzi-lo na uretra.




- 3 Com a mão não dominante, afaste os grandes lábios para a exposição da uretra e insira o cateter suavemente na uretra conforme lhe foi ensinado.

Nunca force a passagem do cateter, se tiver dificuldade procure um serviço de saúde.



4. Quando a urina aparecer, insira o cateter por mais dois centímetros e pare, neste momento a urina irá fluir e você aguardará o esvaziamento total da bexiga. Quando não houver mais fluxo de urina, remova o cateter girando-o lentamente e pare a cada vez que sair urina. Assim que terminar o cateterismo, devolva o cateter para a embalagem e descarte em seu lixo doméstico. Não reutilize o cateter.

Para finalizar, repita a lavagem das mãos com água e sabão.

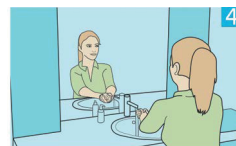

SpeediCath®

Orientações para prescrição:



- ✓ Nome completo do paciente
- ✓ Diagnóstico e CID
- ✓ Porque necessita realizar o cateterismo intermitente
- ✓ Frequência diária do cateterismo intermitente
- ✓ Tipo de cateter e calibre:
"Solicito uso do cateter de poliuretano com revestimento hidrofílico, pronto para uso, calibre _____, "
- ✓ Justificativa para o uso do cateter com revestimento hidrofílico

SpeediCath® oferece diferentes calibres, modelos e tamanhos que respeitam a anatomia e as necessidades de cada indivíduo.

SpeediCath® Standard

Código	Descrição	Tamanho	Quantidade por caixa
28408	Cateter masculino	CH 08	30
28410	Cateter masculino	CH 10	30
28412	Cateter masculino	CH 12	30
28414	Cateter masculino	CH 14	30
28506	Cateter feminino	CH 06	30
28508	Cateter feminino	CH 08	30
28510	Cateter feminino	CH 10	30
28512	Cateter feminino	CH 12	30
28706	Cateter pediátrico	CH 06	30
28708	Cateter pediátrico	CH 08	30

SpeediCath® Compact

28578	Cateter compacto feminino	CH 08	30
28580	Cateter compacto feminino	CH 10	30
28582	Cateter compacto feminino	CH 12	30
28584	Cateter compacto feminino	CH 14	30
28692	Cateter compacto masculino	CH 12/18	30

SpeediCath® Compact Set

28422	Cateter masculino + bolsa integrada	CH 12/18 / 750ml	20
28522	Cateter feminino + bolsa integrada	CH 12 / 750ml	20

Coloplast®
Ativa
Seu paciente,
nosso cuidado



0800 285 8687



ativa@coloplast.com

Uma vida melhor.

Ostomy Care, Continence Care, Wound & Skin Care and Interventional Urology



Coloplast